



A. 준비단계

1 소변컵에 라벨을 부착

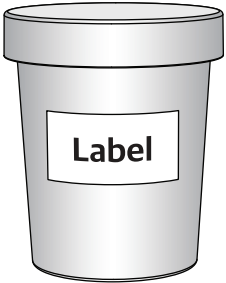

2 소변컵 마개를 열고 제품을 삽입 후
끝까지 밀어 넣음
(제품을 돌리지 않고 밀어 넣어 결합)

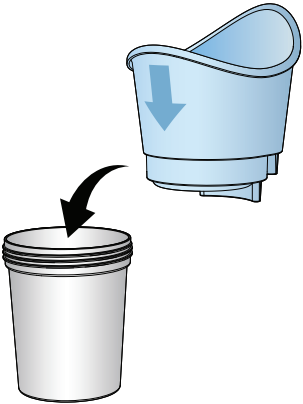


B. 수집단계


3 화살표가 보이는 면을 손으로 잡음
(제품 내부에 손이 닿지 않도록 주의)



4 화살표 면을 앞으로 향하게하여
신체의 충분히 안쪽 위치에 밀착

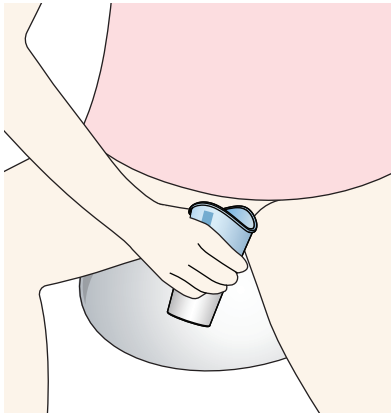


5

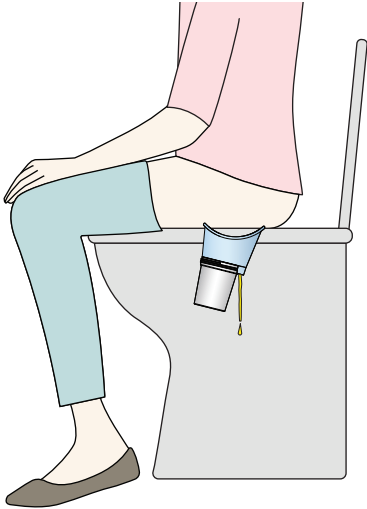

소변을 멈추지 않고 끝까지 진행하고,
배뇨를 마친 후 3초간 기다림
(잔여 소변이 자동 배출되어 소변이
넘칠 우려는 없음)

C. 완료단계

6 제품을 천천히 돌리면서 분리한 후
제품은 지정된 곳에 폐기

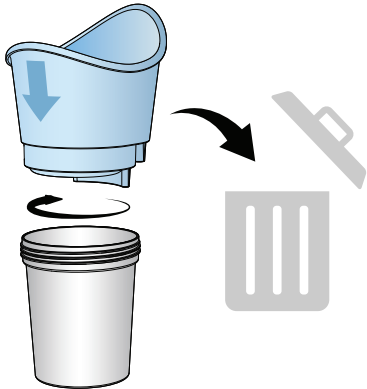

7 소변컵 마개를 완전히 닫음
(마개 안쪽에 손이 닿지 않도록 주의)

