



스마트 소변 수집 장치

[Smart Urine Collection Device]

| 회사소개

우리는 인류의 건강한 미래를 만들기 위해 혁신적인 체외진단 의료기기를 개발하는 선도 기업입니다. 창의적인 연구개발과 지속적인 기술혁신을 통해 의료 현장에서 필요로 하는 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.

체외진단 의료기기 분야에서 혁신을 선도하고 소변을 이용한 자가검사 솔루션을 통해 건강관리 방식을 변화시키고 있습니다. 우리의 목표는 혁신적인 기술을 통해 접근성이 높고 사용자 중심의 건강 관리 솔루션을 제공하는 것입니다.

글로벌 홈테스트 플랫폼 기업으로서 바이오센서와 모바일 헬스케어를 활용해서 신속 정확한 건강 정보를 제공함으로써 전세계 인구의 삶의 질을 향상시키고자 합니다.

사용자가 쉽고 편리하게 자신의 건강 상태를 점검할 수 있도록 의료현장과 일상생활에서 필요로 하는 건강 관리 솔루션을 제공하여 건강한 미래를 함께 만들어 가겠습니다.

OSP
OLOSCOPE



소변을 멈출 필요 없이
자동으로 수집하는
루피(LUPEE)



(주)올로스코프

- 📍 경기도 성남시 중원구 갈마치로 245, 502호
- ☎ 031-741-7621
- ✉ support@oloscope.com
- 🌐 www.oloscope.co.kr

OSP
OLOSCOPE



스마트 소변 수집 장치 '루피(LUPEE)'는 소변을 멈출 필요 없이 자동으로 튜브에 소변을 수집하는 혁신적인 솔루션입니다. 기존의 불편한 소변컵을 대체하여 보다 편리하고 위생적인 소변 검사를 가능하게 합니다.

제품특징

EASY



사용 편의성 개선

소변을 멈출 필요 없이 자동으로 채워지며, 인체공학적 설계로 사용 편의성을 높였습니다.



업무 효율성 향상

소변을 튜브로 옮겨 담는 별도의 과정 없이 튜브에 자동 수집되어 검사 업무의 효율을 높입니다.




위생적 사용 환경


배뇨부터 채취까지 전 과정에서 오염 위험을 줄여 청결하고 위생적인 검사 환경을 제공합니다.

준비 단계

Step 1. 튜브에 라벨 부착

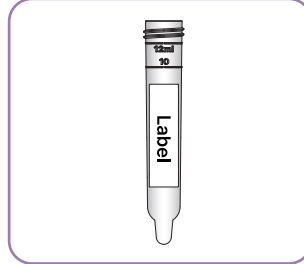


Step 2. 루피와 튜브를 결합

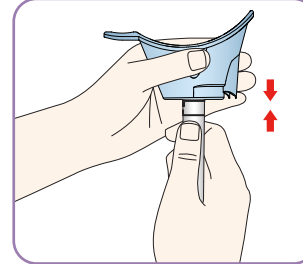

수집 단계


Step 3. 손잡이를 잡고 배뇨를 멈추지 않고 끝까지 진행

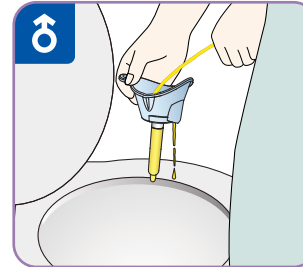


- 손잡이가 앞으로 향하게 신체 아래에 위치시킨다.
- 배뇨를 마친 후 5초간 대기한다.

완료 단계

Step 4. 튜브를 돌려 아래쪽으로 분리

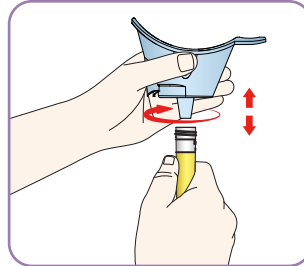

Step 5. 튜브 마개를 완전히 닫음

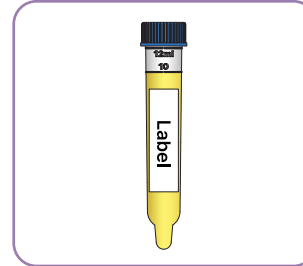

루피



튜브

(L) 115mm x (H) 85mm	크기	(D) 20mm x (H) 105mm
17g	무게	6g
PP	재질	PS

적용대상

01

일반병원

외래 진료 및 소변검사를 받는 대상자



02

여성병원

편리하고 청결한 검사를 원하는 여성



03

검진센터

건강검진 시 소변검사를 받는 수검자

