


A. 준비 단계

1 튜브에 라벨을 부착한다.




2 튜브 마개를 열고, 아래쪽 연결부에 튜브를 돌려서 끝까지 밀어 넣는다.

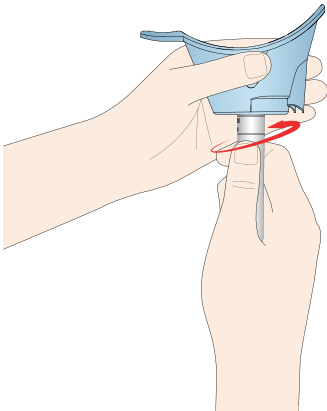


B. 수집 단계

3 손잡이를 앞으로 잡고 소변이 나오는 곳에 가까이 위치시킨다. 양변기에 앉은 자세로 배뇨를 멈추지 않고 끝까지 진행한다.

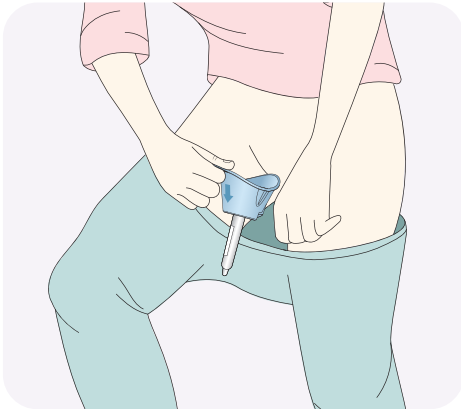

소변은 자동 배출되어 넘치지 않음


4 배뇨를 마친 후 5초간 기다린 다음, 제품을 거치대에 올려 놓는다. (내부에 남은 소변이 배출되도록 하기 위함)

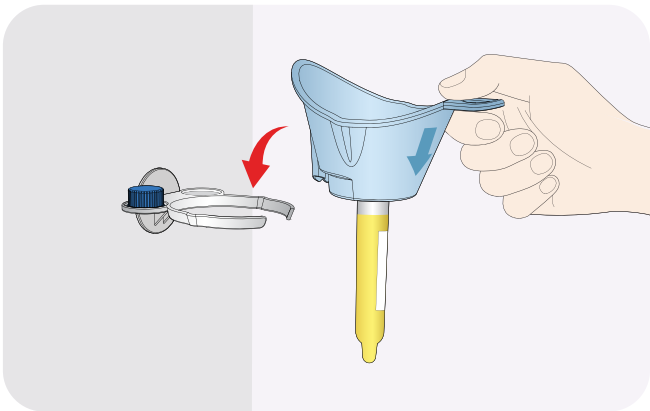

<제품 동영상>

C. 완료 단계

5 수평상태를 유지하고 튜브를 돌려서 아래쪽으로 분리한다.

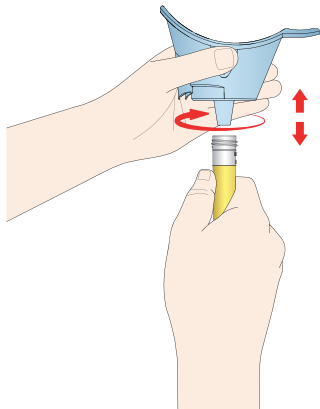

6 제품은 남은 소변을 버리고 폐기한다. 튜브는 마개로 밀봉해서 제출한다

